


Liebe frischgebackene Mama,

schön, dass Sie sich für die Milchpumpe Symphony® und das PersonalFit™ PLUS Pumpset entschieden haben. Wir möchten Sie auf drei wichtige Punkte bei der Nutzung des neuen PersonalFit™ PLUS Pumpsets hinweisen:

Zusammensetzen des Verbindungsstücks

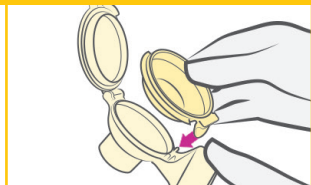


1. Legen Sie die Membrane locker, mit der Lasche in die Öffnung zeigend, in das Verbindungsstück (siehe Pfeil).



2. Schließen Sie den Deckel des Verbindungsstücks vorsichtig, bis er hörbar einrastet. Sie sollten dies ohne großen Kraftaufwand tun können. Falls sich der Deckel nur schwer schließen lässt, stellen Sie sicher, dass Sie die Membrane richtig eingelegt haben.

Abpumpen

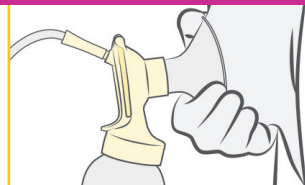

3. Die Brustwarze befindet sich in der Mitte des Tunnels. Halten Sie die Brusthaube mit Daumen und Zeigefinger. Die ovale Brusthaube fühlt sich beim Abpumpen sanfter und komfortabler an als die runde Brusthaube. So wird der Milchfluss optimiert.

Sie haben noch Fragen?

Melden Sie sich gerne bei unserem Kundenservice unter 089 319759-0 oder unter kundenservice@medela.de

Ihr Medela Team

medela 

Medela Deutschland: Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148, 85378 Eching, Deutschland, Tel. +49 89 31 97 59 0, Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de, www.medela.de