



CALESCA – Das schonende und sichere Aufwärm-/Auftaucherät für Muttermilch



STANDARDISIERT:
Schnelles und exaktes Erwärmen und Auftauen der Muttermilch!¹



SCHONENDES ERWÄRMEN:
Keine Überhitzung, so dass Nährstoffe und Vitamine erhalten bleiben – für ein gesundes Baby.



WASSERLOS = SICHER:
Komplett trockenes System schließt mögliche Kontaminationen durch Wasser aus!



HYGIENISCH:
Einweg-Einsätze verhindern Kreuzkontaminationen und ermöglichen eine einfache Reinigung des Geräts.



EINFACH AUFBEWAHREN:
Einmal aufgetaute und gekühlte Muttermilch kann bis zu 24 Stunden verwendet werden!¹



EINFACH AUFTAUEN/ ERWÄRMEN:
Einmal eingestellt, ist kein ständiges Kontrollieren der Muttermilch-Temperatur nötig. Wenn der Aufwärmvorgang abgeschlossen ist, ertönt ein akustisches Signal. Der Alarm kann auch stummgeschaltet werden!¹



EINFACH WARM HALTEN:
Ist der Aufwärm-Zyklus abgeschlossen, wird die Muttermilch weitere 30 Minuten warm gehalten!¹

Calesca erwärmt die Muttermilch bis zur richtigen Trinktemperatur. Nährstoffe und Vitamine bleiben erhalten.

Calesca wurde für den Einsatz am Bett entwickelt und entspricht den höchsten Anforderungen einer neonatologischen Intensivstation. Erhält jede Mutter ein Gerät zum eigenständigen Erwärmen der Muttermilch, kann die Vorbereitung der Mahlzeiten deutlich verbessert werden. Auch ein Vertauschen der abgepumpten Milch kann dadurch verhindert werden. Calesca kann auch bei der zentralen Zubereitung direkt auf der Station eingesetzt werden (z. B. Neugeborenen- oder Kinderstation). Dabei muss auf die richtige Verwendung der Einsätze (z. B. ein Einsatz pro Baby) geachtet werden. So können mit Calesca höchste Hygienestandards erfüllt werden.

Sicher, einfach und schonend – so funktioniert Calesca

Calesca eignet sich zum sicheren Erwärmen von Muttermilch auf 34 °C +/- 4 °C. Dies gilt für alle gängigen Milchflaschen und Spritzen auf dem Markt. Langsames und schonendes Erwärmen garantiert, dass die Zusammensetzung der Milch durch die Temperatur oder die Dauer der Erhitzung nicht beeinträchtigt wird. Nährstoffe und Vitamine bleiben erhalten. Die Milch wird bis zu 30 Minuten warm gehalten, so dass Sie die Milch zur Hand haben, wenn Sie sie brauchen. Calesca arbeitet mit einem Lüfter, durch den warme Luft zirkuliert. Mit diesem völlig wasserfreien System umgeht Calesca das Kontaminationsrisiko von in Wasser erwärmten Mahlzeiten. Zwei separat einstellbare Programme – Aufwärmen und Auftauen – machen das Füttern mit Muttermilch noch flexibler. Das Auftauprogramm ermöglicht schnelles Auftauen, so dass Sie jederzeit Milch für das Baby zur Hand haben. Calesca zeigt die gesamte und die verbleibende Aufwärmzeit an, so dass die restliche Aufwärmdauer stets ersichtlich ist. Mit einem visuellen und akustischen Signal (Stummschaltung möglich) wird angezeigt, dass der Aufwärm- oder Auftauvorgang beendet ist.



Calesca Aufwärm-/Auftaugerät



Einweg-Einsätze



Halterung für Infusionsständer

Bestellreferenz Calesca Aufwärm-/Auftaugerät

Artikelnummer	Produkt	Menge
020.0000	Calesca Aufwärm-/Auftaugerät	1 Stück
020.0002	Einweg-Einsätze	100 Stück
Zubehör für Calesca	Produkt	Menge
020.0001	Halterung für Infusionsständer	1 Stück
Mehr Informationen zu Calesca in der Gebrauchsanleitung, verfügbar in den Sprachen:	Spannung	Stecker
EN/DE/FR/IT/NL/ES/PT/SV/DA/FI/NO/PL/RU/HU/CS/TR/AR/EL/HE/JA/KO/TW/ZH	100-240 Volt	EURO, CH, UK, AUS/NZ, JA

Mehr Informationen zu Calesca finden Sie im Internet unter www.medela.de/calesca oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Medela-Berater.