

CALESCA Quick Card



1. Marking the Quick Card with a marker.

2. Inserting the Quick Card into the device.

3. Closing the lid.

4. Placing the lid on the device.

5. Adding milk. Options:
 - bis zu 250 ml / 161 mm Höhe (bottle icon)
 ODER
 - 1 - 60 ml (syringe icon)

6. Pressing the Quick Card into the milk.


7. Closing the lid.

6. Pressing the Quick Card into the milk.

7. Pressing the start button.

3 Schritte zum Erwärmen/Auftauen der Muttermilch mit Calesca

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>1 →</p> <p>Modus wählen mit</p> <p>< ></p> | <p>WARM</p> <p>Wärmemodus</p> | <p>THAW</p> <p>Auftaumodus (taut automatisch nur bis Kühlschranktemperatur auf)</p> | | <p>Auswahl bestätigen mit</p> <p>enter</p> |
| <p>2 →</p> <p>Starttemperatur wählen mit</p> <p>< ></p> | <p>Kühlschranktemperatur ~4°C</p> <p>Raumtemperatur ~20°C</p> <p>Gefriertemperatur ~20°C</p> | <p>Gefriertemperatur ~20°C</p> | | <p>Auswahl bestätigen mit</p> <p>enter</p> |
| <p>3 →</p> <p>Menge der zu erwärmenden Milch wählen mit</p> <p>< ></p> | <p>888 mL</p> | | | <p>Auswahl bestätigen mit</p> <p>enter</p> <p>Calesca zeigt automatisch die benötigte Zeit für den Aufwärmzyklus an</p> |

 Die Quickcard ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung! Für mehr Informationen lesen Sie bitte die Calesca Gebrauchsanweisung.
 | Überprüfen Sie vor dem Füttern immer die Milchttemperatur!

Aufwärmen/Auftauen der Muttermilch mit Calesca planen

Milch sollte nur in vollständig gefrorenem Zustand aufgetaut werden. Nach dem Auftauvorgang sollte in der Muttermilch etwas Eis verbleiben, damit die optimale Temperatur für die Kühlung gegeben ist.

| Menge | Erwärmen von | | | Auftauen aus |
|--------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | Raumtemperatur | Kühlschrank | Gefrierschrank | Gefrierschrank |
| 10 ml | 4 min 19 s | 6 min 25 s | 29 min 12 s | 12 min 25 s |
| 20 ml | 4 min 48 s | 7 min 36 s | 34 min 03 s | 14 min 17 s |
| 30 ml | 5 min 04 s | 8 min 16 s | 37 min 06 s | 15 min 22 s |
| 40 ml | 5 min 16 s | 8 min 41 s | 38 min 38 s | 16 min 09 s |
| 50 ml | 5 min 28 s | 9 min 06 s | 40 min 10 s | 16 min 56 s |
| 60 ml | 5 min 40 s | 9 min 31 s | 41 min 42 s | 17 min 43 s |
| 70 ml | 5 min 52 s | 9 min 56 s | 43 min 14 s | 18 min 30 s |
| 80 ml | 6 min 04 s | 10 min 21 s | 44 min 46 s | 19 min 17 s |
| 90 ml | 6 min 16 s | 10 min 46 s | 46 min 18 s | 20 min 04 s |
| 100 ml | 6 min 28 s | 11 min 11 s | 47 min 50 s | 20 min 51 s |
| 110 ml | 6 min 40 s | 11 min 36 s | 49 min 22 s | 21 min 38 s |
| 120 ml | 6 min 52 s | 12 min 01 s | 50 min 54 s | 22 min 25 s |
| 130 ml | 7 min 04 s | 12 min 26 s | 52 min 26 s | 23 min 12 s |
| 140 ml | 7 min 16 s | 12 min 51 s | 53 min 58 s | 23 min 59 s |
| 150 ml | 7 min 28 s | 13 min 16 s | 55 min 30 s | 24 min 46 s |
| 160 ml | 7 min 40 s | 13 min 41 s | 57 min 02 s | 25 min 33 s |
| 170 ml | 7 min 52 s | 14 min 06 s | 58 min 34 s | 26 min 20 s |
| 180 ml | 8 min 04 s | 14 min 31 s | 60 min 06 s | 27 min 07 s |
| 190 ml | 8 min 16 s | 14 min 56 s | 61 min 38 s | 27 min 54 s |
| 200 ml | 8 min 28 s | 15 min 21 s | 63 min 10 s | 28 min 41 s |
| 210 ml | 8 min 40 s | 15 min 46 s | 64 min 42 s | 29 min 28 s |
| 220 ml | 8 min 52 s | 16 min 11 s | 66 min 14 s | 30 min 15 s |
| 230 ml | 9 min 04 s | 16 min 36 s | 67 min 46 s | 31 min 02 s |
| 240 ml | 9 min 16 s | 17 min 01 s | 69 min 18 s | 31 min 49 s |
| 250 ml | 9 min 28 s | 17 min 26 s | 70 min 50 s | 32 min 36 s |

! Ist der Aufwärmzyklus beendet, hält Calesca, wenn der Deckel geschlossen bleibt, die Muttermilch automatisch weitere 30 Minuten warm.

Richtlinien zur Aufbewahrung von Muttermilch auf der neonatalen Intensivstation

Frisch abgepumpte Milch



Raumtemperatur
innerhalb von
4 Stunden aufbrauchen



Kühlen
innerhalb von
4 Tagen aufbrauchen



Einfrieren
optimal: innerhalb von
3 Monaten aufbrauchen

Auftauen auf Raum-T°
innerhalb von 4 Stunden
aufbrauchen

Auftauen auf Kühlschrank-T°
innerhalb von 24 Stunden
aufbrauchen

Angereicherte oder aufgetaute pasteurisierte Milch



**Nicht bei
Raumtemperatur
stehen lassen**



**Sofort kühlen
innerhalb von
24 Stunden aufbrauchen**



Nicht einfrieren