

# So unterstützt PersonalFit™ PLUS für Symphony® Hygieneprotokolle in Kliniken

## Sicheres Auffangen von Muttermilch

In der Klinik ist es enorm wichtig, dass die starken schützenden Eigenschaften der Muttermilch bewahrt und Kontaminationsrisiken minimiert werden. Daher ist es auch von so großer Bedeutung, Muttermilch hygienisch auffangen zu können.

Medela bietet das folgende Sortiment an PersonalFit™ PLUS Pumpsets für Krankenhäuser, um unterschiedlichen Hygieneanforderungen, Ressourcen und Vorgaben zu entsprechen. Die beiden Einweg-Ausführungen können nach dem Auspacken sofort verwendet werden.



**Steriles Einwegprodukt**  
Geprüft entsprechend den geltenden Vorschriften für sterile Medizinprodukte und für ihre Lebensdauer zertifiziert.

**Ready-to-Use-Einwegprodukt**  
Hergestellt und verpackt in einem Reinraum, vor der Freigabe mikrobiologisch getestet.


**Wiederverwendbares Pumpset**  
Kann für den Gebrauch durch mehrere Mütter gereinigt und autoklaviert werden.

## Hygienische Handhabung leicht gemacht

Die PersonalFit™ PLUS Pumpsets wurden so konzipiert, dass bei Zusammenbau und Verwendung nur wenige Schritte erforderlich sind.




**Erinnerungshilfe für Mütter**  
Die Verpackung der Einweg-Pumpsets ist mit einem Aufkleber versehen, der einfache Schritt-für-Schritt-Anweisungen enthält. Zur schnellen Erinnerung für eine sichere Verwendung.

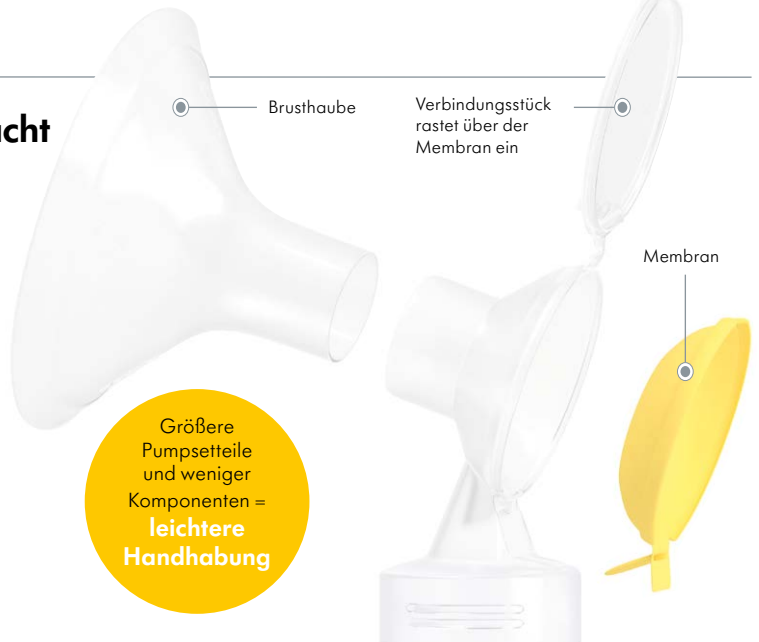

**Überlaufschutz**  
Dieses System wird auch als geschlossen bezeichnet und erhöht die Hygienestandards des PersonalFit™ PLUS Pumpsets. Die eingesetzte Membran verhindert, dass Milch in den Schlauch oder den Motor gelangt.

## Bewährte Verfahren beim Abpumpen

Die Sauberkeit des PersonalFit™ PLUS darf nicht durch unsachgemäße Handhabung beeinträchtigt werden. Vor dem Abpumpen oder der Handhabung des Pumpsets sollten Anwenderinnen auf Folgendes achten:

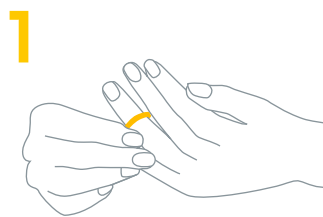


Fingernägel sollten kurz geschnitten sein und Schmuck sollte abgenommen werden.<sup>1</sup>



Hände gründlich waschen.



Mit sauberen Papiertüchern abtrocknen.<sup>2,3</sup>

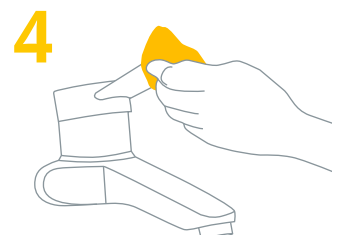

Wasserhähne so zudrehen, dass die Hände nicht wieder kontaminiert werden.<sup>1</sup>

Entdecken Sie das ganze Sortiment von PersonalFit™ PLUS unter [medela.de/pfp](https://www.medela.de/pfp) und erfahren Sie mehr unter [medela.de/schulungsmaterial](https://www.medela.de/schulungsmaterial)

Literaturhinweise 1 Pittet D et al. Infect Control Hosp. Epidemiol. 2009; 30(7):611–622. 2 Harrison WA et al. Am J Infect Control. 2003; 31(7):387–391. 3 Harrison WA et al. Am J Infect Control. 2003; 31(2):104–108.